

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE PRODUIT

30-Juin-2023

RE : Modifications liées au nettoyage et à la désinfection pour BIPAP A40 Pro, BIPAP A40 EFL, BIPAP A30 EFL et de l'humidificateur System One pour l'élimination du Keredusy comme méthode de désinfection.

Chère cliente, cher client,

Philips Respironics a mis à jour le mode d'emploi pour le nettoyage de BIPAP A40 Pro, BIPAP A40 EFL, BIPAP A30 EFL et de l'humidificateur System One afin de retirer le Keredusy comme méthode de désinfection.

Cet avis important concernant le produit vise à vous informer sur :

1. Quelle est la raison des modifications apportées au mode d'emploi et à l'étiquetage?

Il existe une mise à jour du mode d'emploi pour l'étiquetage de cet appareil. Keredusy a été retiré comme méthode de désinfection en raison des effets à long terme inconnus de cette méthode de désinfection sur les composants de l'appareil.

Cette anomalie ne présente aucun danger/préjudice. Aucun événement indésirable, notamment des décès ou des blessures, n'a été signalé.

2. Produits concernés et comment les identifier

BiPAP A40 Pro, BiPAP A40 EFL, BiPAP A30 EFL, l'humidificateur System One A-Series et l'humidificateur System One Q-Series.

3. Les mesures que vous pouvez prendre en tant que client pour minimiser l'effet des modifications

Pour les appareils A40/A30, veuillez consulter l'addendum au mode d'emploi ci-joint avec les révisions apportées aux méthodes de nettoyage et de désinfection ainsi que la mise à jour de la couverture de la garantie du produit.

Pour l'humidificateur System One, veuillez consulter le mode d'emploi ci-joint avec les révisions apportées à la méthode de nettoyage et de désinfection ainsi que la mise à jour de la couverture de la garantie du produit.

4. Les actions prévues par Philips

Philips a mis à jour le mode d'emploi de l'humidificateur System One (joint à la présente lettre).

Les prochaines révisions des modes d'emploi de A40/A30 intégreront les informations fournies dans les addenda ci-joints.

5. Informations et assistance supplémentaires

Pour tout renseignement ou toute assistance concernant cette anomalie, veuillez contacter votre représentant Philips local : US: 1-(877)-387-3311 or email at patientsupport@philips.com.

Philips vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée.

Sincères salutations,



Michael Mizrachi
Responsable Qualité
Soins respiratoires hospitaliers

Pièce jointe : appareils concernés

BIPAP A40 Pro, BIPAP A40 EFL, BIPAP A30 EFL, l'humidificateur System One					
1056209	AUX3100S19	CN267TS	ESX3100T19	GBX3H	ITX3000H21
1056210	BLX3000H19	CN467TS	ESX3H	GBX3T	ITX3000S21
1056212	BLX3000S10	CN567TS	ESX3T	HL6H	ITX3000T21
1056215	BLX3000T19	CN667TS	FI6H	HL6HFLG	ITX3100H21
1056216	BLX3100S19	CN767TS	FI6T	HL6T	ITX3100S21
1077107	BLX3H	CNV207H	FR1056210	HL6TFLG	ITX3100T21
1096124	BLX3T	CNV207HN1	FR1111555	IAX3000H19	ITX3H
1111146	BRX3000S18	CNV507H	FR6H	IAX3000S19	ITX3T
1111148	BRX3100S18	CNV507HN1	FR6T	IAX3000T19	NDX3000H19
1111172	CA221NTS	DE6H	FRX3000H14	IAX3100H19	NDX3000S19
1111174	CA261HS	DEX2900S13	FRX3000S14	IAX3100S19	NDX3000T19
1111552	CA261NTS	DEX3000S13	FRX3000T14	IAX3100T19	NDX3100H19
1111555	CA261TS	DEX3100S13	FRX3100H14	IN6H	NDX3100S19
1120348	CA521HS	DEX3H	FRX3100S14	IN6HFLG	NDX3100T19
1120349	CA521NTS	DEX3T	FRX3100T14	IN6T	NDX3H
1147249	CA521TS	EEX3000S19	FRX3H	IN6TFLG	NDX3T
AC1056209	CA961HS	EEX3100S19	FRX3T	INDV501H	NO6H
ARX3000S19	CA961NTS	ES6H	GB6H	INX3000H19	NO6T
ARX3100S19	CA961XTS	ES6HXS	GB6T	INX3000S19	PT6H
AU461HS	CAV201H	ES6T	GBX3000H19	INX3000T19	PT6T
AU461TS	CAV501H	ESX3000H19	GBX3000S19	INX3100H19	RBR1056210
AU561TS	CAX3000S12	ESX3000S19	GBX3000T19	INX3100S19	SE6H
AUV201H	CAX3000T12	ESX3000T19	GBX3100H19	INX3100T19	SE6T
AUV501H	CAX3100S12	ESX3100H19	GBX3100S19	INX3H	SPX3100S19
AUX3000S19	CAX3100T12	ESX3100S19	GBX3100T19	INX3T	UO1056209
				IT1111552	ZA6H